

Postup testování

Tento postup vychází z oficiálního manuálu výrobce, jen je upravený pro podmínky školy. **Před testováním i po testování je nutná dezinfekce rukou.**

Postup:

- 1) učitel si připraví do stojánku zkumavky s testovacím roztokem (cca 6 kapek) a zátky na zkumavky,
- 2) děti si rozbalí testovací kartu a položí na lavici,
- 3) děti si rozbalí tamponovou tyčinku,
- 4) sterilním tamponem na konci tyčinky přejedou asi pětkrát po sliznici v obou nosních dírkách,
- 5) s tyčinkou v ruce si děti počkají na zkumavku s roztokem,
- 6) tyčinku ponoří tamponem do roztoku a asi 10x zamíchají, tampon přitlačí na chvíli ke dnu zkumavky, aby se stěr co nejvíc uvolnil,
- 7) tyčinku nechají minutu v roztoku, pak zkumavku lehce stlačí (aby se tampon „vyždímal“) a vytáhnou tamponovou tyčinku,
- 8) se zkumavkou i tyčinkou jdou děti jednotlivě k určenému odpadkovému koši – vyhodí tyčinku a na stolku si vezmou zátku a zazátkují si zkumavku,
- 9) ze zkumavky děti kápnou 3 kapky na testovací okénko testovací karty,
- 10) děti jednotlivě odnesou zkumavku do určeného odpadkového koše,
- 11) čeká se 15 minut na výsledek testu – dvě čárky = pozitivní; jedna čárka = negativní,
- 12) učitelka zkontroluje testovací karty, děti po kontrole odnášejí karty do určeného koše.

Je možná drobná modifikace dle druhu testu. Nejedná se o velké rozdíly.

Videonávod: <https://www.goodtest.cz/videonavod>